

HYABAK

Hialuronato de Sódio 0,15% - agente lubrificante e hidratante

Composição:

Hialuronato de Sódio 0,15% - agente lubrificante e hidratante

Apresentação:

Frasco em Sistema ABAK 10 ml

Código nacional:

Hyabak 10 ml encontra-se à venda exclusivamente em farmácias com o código 6781302.



Composição:

Hialuronato de Sódio 0,15% - agente lubrificante e hidratante

Cloreto de Sódio 0,57% - agente hipo-osmótico

Actinoquinol 0,2% - agente que actua como filtro UV

QUANDO SE DEVEM UTILIZAR ESTES DISPOSITIVOS:

HYABAK e HYABAK PROTECTOR são soluções destinadas a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contacto.

Sistema ABAK - Sem conservantes

Foram concebidos:

- Para humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga ocular induzidas por factores exteriores, tais como, o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado em frente de um ecrã de computador.

- Nos utilizadores de lentes de contacto, permite a lubrificação e hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e propociona um conforto imediato na utilização ao longo do dia.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:

- Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco.

- Não injetar, não engolir.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INTERAÇÕES:

É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares.

COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

POSOLOGIA:

1 gota em cada olho durante o dia, sempre que necessário. Nos utilizadores de lentes: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que necessário ao longo do dia.

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

INSTILAÇÃO OCULAR

Para uma utilização correcta do produto é necessário ter em conta determinadas precauções:

- Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação.
- Evitar o contacto da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e dirigindo o olhar para cima. O tempo de aparição de uma gota é mais longo do que com um frasco clássico.
- Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contacto: instilar uma gota de HYABAK na concavidade da lente.

FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO:

Distribuir as instilações ao longo do dia, conforme necessário.

EFEITOS NÃO PRETENDIDOS E INCÓMODOS:

Rara possibilidade de ligeiras irritações oculares.

CONSERVAÇÃO DO DISPOSITIVO:

NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM EXTERIOR

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C.

Depois de aberto, o frasco não deve ser conservado mais de **8 semanas**.

FABRICANTE:

LABORATOIRES THÉA

GRUPO EUROPEU LÍDER EM OFTALMOLOGIA

Edifício Euro, Rua Pedro Álvares Cabral, 24- 5ºF, 2670-391 Loures

Tel.:(+351) 21 982 31 31 Fax:(+351) 21 982 31 30

informacao@laboratoires-thea.pt