

Suprilag[®]

LUBRIFICANTE
OFTÁLMICO

ALTA PERFORMANCE

APRESENTAÇÃO

SUPRILAG UL é uma solução límpida, incolor e levemente viscosa. Antes de usar, observe o aspecto do produto, caso ele esteja dentro do prazo de validade e você observar alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

SUPRILAG UL é apresentado em frasco plástico com bico conta-gotas, podendo ser encontrado em versões com 10 mL ou 15 mL de produto no frasco.

COMPOSIÇÃO

Propilenoglicol, polietilenglicol 400, sorbitol, carmelose sódica, ácido bórico, cloreto de potássio, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado, aminometilpropanol e água purificada. Pode conter hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÃO

SUPRILAG UL é indicado para lubrificação e hidratação ocular, para alívio da sensação de secura e irritação nos olhos e também para prevenir desconfortos no uso de qualquer tipo de lentes de contato.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

SUPRILAG UL age como protetor contra as irritações e danos oculares. Sua fórmula com carmelose sódica, se combina com as lágrimas do usuário, proporcionando melhora imediata na hidratação do olho, ajudando a interromper a evolução dos sintomas de irritação característicos do olho seco. O componente sorbitol auxilia na manutenção da viscosidade da solução, propriedade fundamental para a formação do filme lacrimal e umectação ocular. SUPRILAG UL alivia as sensações de ressecamento, ardência, irritação, sensação de areia e corpo estranho e outros desconfortos oculares causados ou agravados por fatores como síndrome do olho seco, exposição a poeiras, fumaças, raios ultravioleta, calor seco (sauna), ar-condicionado, vento, cosméticos e exposição prolongada a telas (computadores, celulares, TVs). Além disso, o uso de alguns medicamentos como betabloqueadores, broncodilatadores, antidepressivos, anti-histamínicos e antiarrítmicos podem contribuir para o agravamento destes sintomas. SUPRILAG UL apresenta compatibilidade com qualquer tipo de lente de contato, podendo ser utilizado como re-umidificante durante o uso das mesmas, auxiliando no alívio da secura, do desconforto e da irritação que podem estar associados ao uso desses dispositivos.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Lave bem as mãos antes de usar o produto. SUPRILAG UL é administrado via instilação ocular. Incline parcialmente a cabeça, olhando para cima, e puxe delicadamente a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa. Pressione suavemente o frasco acima do olho para pingar uma ou duas gotas. Evite o contato do bico conta-gotas do frasco com os olhos, dedos ou quaisquer outras superfícies, devido ao risco de

contaminação da solução. Após a utilização, mantenha sempre o frasco bem fechado.

CONTRAINDICAÇÕES

SUPRILAG UL é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Exclusivamente para uso externo.
- Seguir rigorosamente as instruções de seu médico especialista e as instruções de uso deste folheto que acompanha o produto.
- Não utilize o produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Não utilize se houver alteração da cor do produto ou se este se tornar turvo.
- Para evitar contaminação não toque o bico conta-gotas do frasco em nenhuma superfície.
- Tampar após o uso.
- Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.
- Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
- Respeitar a data de validade marcada no produto.
- Descartar o restante da solução, em caso de sobra, após 60 dias da abertura do frasco.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Em caso de ingestão, consultar um médico.
- Interromper o uso e consultar um médico em caso de aparecimento de reações indesejáveis.

EVENTOS ADVERSOS

Ao aplicar produtos oftálmicos, é comum sentir incômodos como ardência, sensação de corpo estranho e visão turva, que desaparecem em poucos minutos. Se essas sensações permanecerem por muito tempo, interrompa o tratamento, procure seu oftalmologista e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30°C. O produto deve ser protegido da luz solar, umidade e não deve ser congelado.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação. Não utilize após a data de vencimento. Após aberto, válido por 60 dias. PRODUTO ESTÉRIL (por calor). NÃO USAR SE O FRASCO ESTIVER DANIFICADO OU COM O LACRE ROMPIDO.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 642 9109
sac@laboratoriolebon.com.br

FABRICADO POR:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.
Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial Restinga
Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91790-005
CNPJ: 87.375.952/0001-78
Resp. Técnica: Paula de Oliveira Moretto | CRF/RS: 563284
Registro ANVISA/MS: 80256510020
INDÚSTRIA BRASILEIRA